

JOYDIVISION SOFT-TAMPONS

Návod k použití & bezpečnostní průvodce (Balení Normal 10 ks)

JOYDIVISION — MADE WITH LOVE IN GERMANY

DOBŘE VĚDĚT

JOYDIVISION Soft-Tampons jsou bezprovázkové měkké tampóny z hypoalergenní pěny, které poskytují diskrétní ochranu během menstruace. Sice váží pouze cca 2 gramy, ale mají vysokou absorpční schopnost a přizpůsobí se tělu.

Jsou ideální pro aktivní životní styl – při sportu, plavání, saunování, wellness i pro ničím nerušený intimní styk během menstruace.

MATERIÁL A CERTIFIKACE

Německý výrobce garantuje nejvyšší standardy čistoty, dermatologické bezpečnosti a šetrnosti k tělu:

- **OEKO-TEX® STANDARD 100:** Certifikováno dle nejpřísnější Třídy 1 (vhodné i pro miminka).
- **Materiál (PUR):** Čistá polyuretanová pěna bez obsahu latexu, gumy či přírodního kaučuku.
- **100% Bez chemie:** Neobsahuje glyfosát, pesticidy ani bělidla.
- **Dermatest®:** Klinicky a dermatologicky testováno s nejlepším hodnocením "Sehr gut".

JAK SOFT-TAMPONY FUNGUJÍ?

Fungují na principu pružné absorpční pěny. Díky ergonomickému srdcovitému tvaru se tampón přizpůsobí anatomii pochvy a drží pevně na svém místě.

Absorbují menstruační krev uvnitř bez nutnosti visícího provázku. Zúžená špička usnadňuje zavedení a patentovaná spodní uchytka (poutko) umožňuje snadné vyjmutí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zavedení: Před manipulací si důkladně umyjte ruce. Vyjměte tampón z obalu. Pro snazší zavedení jej můžete lehce navlhčit gelem AQUAglide nebo trochou vody (vodu předem lehce vymačkejte). Stlačte tampón ze stran, přiložte ukazováček do spodní jamky a zaveďte hluboko k děložnímu hrdlu.

2. Poloha & Vyjmutí: Vyjímání je nejsnadnější v podřepu. Zatlačte břišním svalstvem směrem dolů, zasuňte prst do pochvy, zachyťte integrované poutko (drážku) na spodní straně a tampón opatrně vytáhněte.

3. Doba nošení:

- **Silná menstruace:** Měňte každé 3 až 5 hodin.
- **Slabá menstruace:** Měňte nejpozději po 8 hodinách.

Poznámka: Vyjmutí je nejjednodušší, když je tampón plně nasáklý. Vždy měňte tampón ihned po intimním styku bez kondomu.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Max. 8 hodin:** Nikdy nenechávejte tampón v těle déle než 8 hodin!
- **Jednorázové použití:** Tampón neperte ani nepoužívejte opakovaně. Patří do směsného odpadu (ne do WC).
- **Není antikoncepce:** Soft-Tampons nechrání před otěhotněním ani před pohlavními nemocemi.
- **Syndrom toxického šoku (TSS):** Při náhlé vysoké horečce (>39°C), nevolnosti nebo vyrážce tampón ihned vyjměte a kontaktujte lékaře.
- **Nitroděložní tělísko (IUD):** Při velmi slabém krvácení postupujte při vyjímání opatrně, aby se pěna nezachytila o vlákno tělíska.